

ABRI-Form – u ležících pacientů



1.
Pro dosažení

2.
Přeložené



3.
Kalhotky



4.
Kalhotky



5.
Nakonec



ABRI-Form

Zalepovací kalhotky Abri vhodné pro imobilní, přikládat se mohou ve stoje i vleže.



1.
Pro dosažení co největší savosti a snadnější vložení pomůcky, přeložíme kalhotky na polovinu.

2.
Přeložené kalhotky vložíme mezi stehna a zasuneme do třísel.



3.
Kalhotky rozvineme vpředu i vzadu, uprostřed se vytvoří tzv. „korýtko“.

4.
Kalhotky připevníme lepicími proužky nejdříve spodním proužkem.



5.
Nakonec fixujeme horním proužkem – dotáhneme. Není nutná následná fixace.

www.abena.cz
www.abenashop.cz
www.tvmedicina.cz

ABENA®

...pečujeme o Vás



Aplikace
pomůcek
pro inkontinentní

Pro vyšší kvalitu života

ABRI-San

Vložná plena Abri San je určena zejména pro mobilní klienty. Vložnou plenu fixujeme fixačními pomůckami Abri Fix. Pro větší pleny jsou nejvhodnější Abri Fix Leaf a Abri Fix Soft Cotton.



1. Pro dosažení co největší savosti a snadnější vložení pomůcky, přeložíme plenu na polovinu.

2. Přeloženou plenu vložíme mezi stehna a zasuneme do třísel.



3. Plenu rozvineme vpředu.

4. Plenu rozvineme vzadu na hýždě. Uprostřed pomůcky se vytvoří tzv. „korýtko“.



5. Ujistíme se, že plena netlačí – hlavně v tříslech, plenu fixujeme fixačními pomůckami.

ABRI-San – u ležících pacientů



1. Pro dosažení

2. Přeloženou



3. Plenu



4. Plenu



5. Ujistíme se



ABRI-Flex

Navlékací kalhotky Abri Flex jsou vhodné pro mobilní klienty, na cestování, pro klienty provádějící nácvik kontinence, pro klienty s demencí.



1. Pro dosažení co největší savosti a snadnější vložení pomůcky, přeložíme kalhotky na polovinu.

2. Navlékací kalhotky oblečeme jako osobní prádlo. Není nutná následná fixace.



3. Odstranění kalhotek provádíme roztržením na obou stranách ve švu.

